

EZee Life™

Barre d'appui pour le bain 16 po

Model: CH2034



EZee Life™ Products

34 Futurity Gate, Unit 15
Concord, Ontario L4K 1S6



Garantie limitée:

Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.

Spécifications :

Hauteur (installé)	16 po
Hauteur de la deuxième prise :	9 po
Diamètre de la barre :	1,75 po
Méthode d'installation :	Serrage
Ouverture d'installation :	2 3/4 po à 6 1/2 po
Poids du produit :	5,1 lb (2,32 kg)
Limite de poids :	300 lb (peut varier selon la solidité du serrage)

Caractéristiques :

Plastique facile à nettoyer

Modèle ergonomique

Prise sécuritaire

Facile à installer, aucun outil requis

Sans rouille ni égratignure (à l'exception du levier de serrage)

Modèle attrayant

Modèle à prise double

Installation :

1. Nettoyer et assécher la paroi de la baignoire où sera installée la barre pour assurer une prise sécuritaire.

2. Lever le levier de serrage et dévisser pour élargir l'ouverture de sorte qu'elle soit légèrement plus large que la paroi de la baignoire.


3. Glisser la barre d'appui sur la paroi et l'appuyer fermement sur le rebord de la baignoire à l'endroit désiré en prenant soin de placer le levier de serrage à l'extérieur de la baignoire.

4. Serrer le mécanisme à l'aide du levier de serrage, suffisamment pour que la barre demeure immobile pendant l'utilisation.

5. Tester la stabilité de la barre en exerçant une pression vers l'avant, vers l'arrière et de gauche à droite. Si la barre glisse, s'assurer que la paroi de la baignoire est sèche et exempte de film savonneux ou d'autres substances et serrer de nouveau.

Les barres d'appui doivent être resserrées de temps à autre. Vérifier périodiquement avant utilisation et resserrer au besoin.

Un serrage excessif peut endommager la barre d'appui ou la paroi de la baignoire.

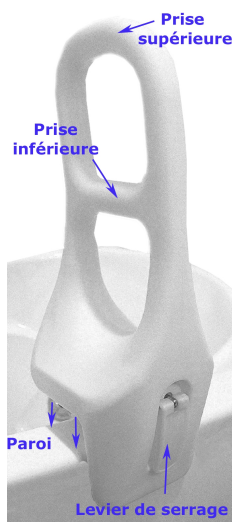



MISE EN GARDE : Les barres d'appui ne conviennent pas à tous les types de baignoires. Les baignoires à parois en pente prononcée ou à rebords décoratifs peuvent ne pas permettre une installation sécuritaire. Les parois de baignoires en fibre de verre peuvent ne pas être assez solides pour résister à la pression de serrage.

Mode d'emploi :

La prise supérieure de la barre d'appui vise à contribuer au maintien de l'équilibre de l'utilisateur qui entre dans la baignoire et en sort. En aucun temps l'utilisateur ne doit s'y appuyer de tout son poids.

La prise inférieure est plus solide et l'utilisateur peut s'y appuyer de tout son poids au moment de s'asseoir dans la baignoire ou de se lever.

Avis de sécurité :

N'installez pas cet équipement sans d'abord avoir lu et compris le manuel de l'utilisateur. Si vous ne comprenez pas les avertissements, mises en garde et instructions, communiquez avec votre détaillant.

Tenez la barre fermement pour entrer dans la baignoire et en sortir.

N'utilisez PAS ce produit si votre poids dépasse la limite maximale.

Assurez-vous TOUJOURS que la barre est sécuritaire avant de l'utiliser.

N'utilisez PAS ce produit s'il montre des signes apparents de dommage.

Ne vous appuyez PAS de tout votre poids sur la prise supérieure.

Instructions de nettoyage :

Les produits EZee Life peuvent être nettoyés avec la plupart des produits de nettoyage commerciaux.

N'utilisez pas de produits abrasifs.

Nous vous recommandons de nettoyer les surfaces et les composantes avec une solution de détergent doux (savon à vaisselle, etc.) pour éliminer les matières organiques.

Une fois nettoyée, la barre peut être désinfectée en l'essuyant à l'aide d'une solution de 5 % de javellisant et d'eau (1 tasse de javellisant pour 1 gallon d'eau). Laissez la solution de javellisant en contact avec les surfaces pendant 3 à 5 minutes, rincez généreusement à l'eau claire.

Remarque : Le javellisant réagit à l'ammoniac et aux matières organiques (fèces) produisant des gaz susceptibles d'irriter les yeux et les poumons. Utilisez dans un endroit bien aéré et évitez tout contact avec d'autres produits chimiques et matières organiques.

Imported / Distributed by:

Factory Direct Medical
34 Futurity Gate, Unit # 15
Concord Ontario L4K 1S6
Local: 416-739-8393
Toll Free: 855-235-2400

