

# EZee Life™

Barre d'appui en acier inoxydable pour le bain

Modèle : CH2039



EZee Life™ Products  
34 Futurity Gate, Unit 15  
Concord, Ontario L4K 1S6



## Garantie limitée:

Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.

## Instructions d'installation

1. Nettoyez la baignoire et asséchez à fond avant de poser la barre. Les surfaces de contact doivent être sèches et exemptes de résidus de savon pour assurer une installation sécuritaire.
2. Déployez le bouton et ouvrez jusqu'à ce que la barre soit suffisamment large pour se glisser sur le côté du bain.
3. Déposez le banc de douche dans le bain en plaçant la poignée vers l'extérieur. La poignée permet de faciliter l'entrée et la sortie du bain.
4. Pour mettre l'installation de la barre à l'essai, tirez vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Si la barre glisse ou bouge, assurez-vous que la surface est exempte de résidu de savon et bien sèche, remplacez ensuite à l'endroit désiré et resserrez.

**La barre d'appui doit être resserrée à l'occasion. Vérifiez périodiquement avant utilisation et resserrez au besoin.**

## MISE EN GARDE

Soyez excessivement minutieux lors de l'installation dans des baignoires en fibre de verre.

**NE PAS TROP SERRER** pour éviter que la fibre de verre ne se fissure.

### Importé / Distribué par:

Factory Direct Medical  
34 Futurity Gate, Unit # 15  
Concord Ontario L4K 1S6  
Local: 416-739-8393  
Toll Free: 855-235-2400

