

EZee Life™

Déambulateurs économiques

Modèle : CH3010 – Standard, bleu

CH3020 – Standard, rouge

CH3031 – Surbaissé, rouge



CH3020



CH3010



CH3031

Produits EZee Life^{MC}

34, Futurity Gate, Unité 15, Concord (Ontario) L4K 1S6

Spécifications :

Spécification	CH3010	CH3020	CH3031
Matériau du cadre	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Poids	17,9 lb	17,9 lb	18,3 lb
Dimension des roues	8 po	8 po	8 po
Largeur du siège	13 3/4 po	13 3/4 po	13 3/4 po
Profondeur du siège	13 1/4 po	13 1/4 po	13 1/4 po
Hauteur du siège	22 1/4 po	22 1/4 po	18 1/2 po
Distance entre les poignées	17 1/2 po	17 1/2 po	20 1/2 po
Hauteur des poignées	36 po à 39 1/4 po	36 po à 39 1/4 po	35 3/4 po à 40 po
Limite de poids	264 lb	264 lb	220 lb
Taille de l'utilisateur (approx.)	5 pi 8 po à 6 pi 1 po	5 pi 8 po à 6 pi 1 po	4 pi 6 po à 5 pi 4 po

Caractéristiques :

Léger

Facilement maniable

Siège rembourré rabattable

Barre de dossier rembourrée

Panier à maillage

Freins à main

Pneus pleins anti-crevaison

Cadre en aluminium

Prix économique

Garantie limitée :

Les produits de marque EZee Life^{MC} s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication.

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. EZee Life^{MC} se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles.

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

Guide des pièces du déambulateur

A – Câble de frein

B – Dossier

C – Support du dossier

D – Pochette de transport

E – Poignée

F – Levier de frein

G – Vis de blocage des poignées

H – Porte-canne (partie sup.)

I – Siège


J – Porte-canne (partie inf.)

K - Roue



Assemblage

1. Retirez le déambulateur de la boîte et déballez les pièces.
2. Insérez les poignées de poussée dans la partie supérieure des pattes avant.
3. Alignez les trous des poignées de poussée avec ceux des pattes à la hauteur désirée et insérez les boulons fournis.
4. Serrez les vis de blocage sur les boulons.

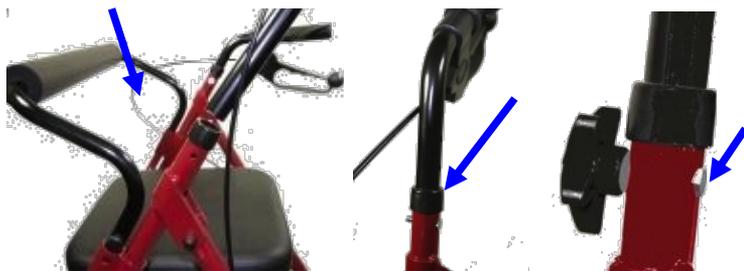

5. Insérez le dossier dans le support pour dossier sur les pattes avant jusqu'à ce qu'il se verrouille.



Réglage de la hauteur des poignées

Pour un réglage adéquat, tenez-vous debout, les épaules détendues et les bras le long du corps. Réglez les poignées à la hauteur de l'intérieur de votre poignet, là où vous porteriez une montre.





Pliage

1) Verrouillez les freins en appuyant sur les deux leviers de frein jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

2) Relevez le siège à la verticale et tirez sur la courroie fixée au mécanisme de pliage.

3) Facultatif : Vous pouvez retirer le dossier en tout temps en dégageant les goupilles de verrouillage et en soulevant le dossier pour le retirer de son support.



Dépliage

Pour déplier, abaissez le mécanisme de pliage jusqu'à ce qu'il soit en pleine extension.



Fonctionnement des freins

Appuyez toujours sur les deux leviers de frein pour verrouiller les roues avant de vous asseoir. **MISE EN GARDE** : Les roues arrière se verrouilleront, mais le déambulateur pourrait quand même glisser sur une surface mouillée.



Serrez les deux leviers de frein pour déverrouiller (2). **MISE EN GARDE** : Ne relâchez jamais les freins avant d'être debout, stable et prêt à vous déplacer. Ne relâchez pas les freins en position assise.



Si vous marchez et souhaitez ralentir, serrez légèrement les leviers de frein pour exercer une pression de freinage sur les roues.

Réglage des freins

Avec le temps, les câbles de frein peuvent s'étirer et nécessiter un ajustement.

1) Les freins relâchés, desserrez l'écrou de verrouillage à l'aide d'une petite clé ou d'une paire de pinces en tournant dans le sens antihoraire.

2) Avec les doigts, dévissez la vis de réglage pour serrer les freins. Un tour ou deux devrait suffire.

3) Tout en maintenant la vis de réglage en place, serrez l'écrou de verrouillage.

4) Répétez la manœuvre pour l'autre frein.



Remarque : Si les freins sont trop lâches, les roues continueront de tourner lorsque vous appliquerez les freins. Si le câble est trop serré, les freins ne se verrouilleront pas.

IMPORTANT : Avant d'utiliser le déambulateur, assurez-vous du bon fonctionnement des freins. Si les roues tournent à l'application des freins, faites-les ajuster avant d'utiliser le déambulateur.

Avis de sécurité

Consultez un médecin ou tout autre professionnel de la santé afin de déterminer si cet équipement répond à vos besoins.

Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées, que les freins fonctionnent et que le cadre est complètement ouvert avant l'utilisation.

Verrouillez toujours les freins avant de vous asseoir et gardez-les verrouillés jusqu'à ce que vous vous leviez et que vous soyez prêt à vous déplacer.

Dans les pentes, déplacez-vous vers le haut ou vers le bas. NE traversez PAS les pentes.

Soyez prudent sur les surfaces glissantes.

Ne serrez pas trop la quincaillerie fixée au cadre. Cela pourrait endommager les tiges du cadre ou le filetage.

Ne vous tenez pas debout sur le siège.

Ne surchargez pas le déambulateur. La limite de poids est de 264 livres (220 lb pour le modèle CH3031), ce qui comprend le poids de l'utilisateur et de tous les objets qu'il transporte.

Points d'inspection

Assurez-vous que le déambulateur roule en ligne droite (pas de résistance ni de traction d'un côté).

Inspectez le siège à la recherche de déchirures ou d'affaissement excessif.

Inspectez les poignées à la recherche d'usure, de relâchement ou de dommages.

Vérifiez la quincaillerie ou les pièces lâches ou brisées.

Vérifiez la présence de roues fissurées, brisées ou lâches.

Importé / Distribué par :

Factory Direct Medical
34, Futurity Gate, Unité 15
Concord (Ontario) L4K 1S6
Téléphone : 416-739-8393
Sans frais : 1-855-235-2400